








	CO?	ČÍM?	JAK?	KDY?	KDO?	
 povrchy	Čištění a dezinfekce povrchů citlivých na alkohol.	Direct Foam Extra Direct Wipes NA	Nastříkejte na celý povrch, počkejte 5 minut. V případě potřeby setřete suchým hadříkem nebo otřete ubrouskem Direct Wipes NA a nechte uschnout.	V případě potřeby.		
	 lékařské zařízení	Mytí a postřiková dezinfekce neinvazivního zdravotnického vybavení, např. zubních souprav, nábytku.	Direct Wipes NA Direct Spray SL	Nastříkejte/setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí.	Před a po každém použití, v případě kontaminace nebo v případě potřeby.	
 odsávací zařízení	Čištění a desinfekce odsávacích zařízení, hadic, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy.	Direct Unit NF	2% = 15 minut. (20 ml na 980 ml vody) Opláchněte vodou.	Pokud možno po každém použití, kdy bylo odsáváno (obzvláště krev). Na konci každého pracovního dne.		
 chirurgické nástroje	Čištění a desinfekce chirurgického a rotačního instrumentária	Direct Forte SL	0,5% = 30 minut (5 ml na 995 ml vody). Poté do roztoku ponořte nástroje na 30minut. Opláchněte čistou vodou.	Okamžitě po použití.		
	 rotační nástroje	Čištění a desinfekce rotačního instrumentária	Direct Bohr SL	Ponořte na 15 minut do produktu připraveného k použití. Poté opláchněte, vysušte a sterilizujte.	Okamžitě po použití.	
	 koncovky	Čištění a dezinfekce stomatologických násadců	Direct Spray SL Direct Wipes NA	Nastříkejte/setřete povrch a počkejte 30 sekund nebo do úplného uschnutí.	Okamžitě po použití.	
 mytí rukou	Mytí rukou.	Direct Des Soap SL	Vlažnou tekoucí vodou pečlivě opláchnout napěněné mýdlo z rukou. Otřít jednorázovým papírovým ubrouskem.	V případě potřeby.		