

# Direct Spray SL

---

Připravený alkoholový roztok  
pro postřikovou desinfekci povrchů,  
nástrojů a stomatologických koncovek.

**Použití:** Direct Spray SL je určený pro postřikovou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, například na: vyšetřovací lehátka, operační křesla, zdravotnické nástroje, neinvazivní operační nástroje, nástroje pro rehabilitaci a jiné těžko dostupné povrchy zdravotnických prostředků. Doporučujeme hlavně pro skleněné a lesklé povrchy neinvazivních zdravotnických prostředků. Přípravek může být použit pro zdravotnické prostředky v těsném kontaktu s potravinami. Doporučuje se také pro dezinfekci stomatologických koncovek před sterilizačním procesem, stejně jako protetických lžic a silikonových otisků. Produkt neobsahuje aldehydy a fenoly.

**Návod k použití:** Aplikujte přípravek na povrch ze vzdálenosti asi 30 cm a dbejte na jeho úplné pokrytí. Ponechte ho po celou dobu účinku přípravku. Po zaschnutí na povrchu nezanechává pruhy. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol (např. akrylové sklo). Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.

**Mikrobiologická účinnost:** Bakterie (včetně MRSA) podle normy: EN 13727 – 30 sec. Houby (*C. albicans*) podle normy: EN 13624 – 15 sec. Bakterie tuberkulózy (*M. terrae*) podle normy: EN 14348 – 30 sec\*, 60 sec. Viry (*Vaccinia*, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola) podle normy: EN 14476 – 30 sec\*, 60 sec. Virus Rota v souladu s normou: EN 14476 – 30 sec.\*, 60 sec. Noro virus podle standardu: EN 14476 – 30 sec. (\*nízké ekologické zatížení).

**Složení:** 100 g přípravku obsahuje: 63,7 g ethanolu, 6,3 g propan-2-olu.

**Bezpečnostní opatření:** Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí oči. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji vznícení. Nekuřte.

**Pokyny pro ochranu:** V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, a odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Likvidujte obsah / nádobu v souladu s národními předpisy. **Obsahuje:** propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Podle nařízení. 648/2004.

# Direct Spray SL

---

Pripravený roztok na báze alkoholu určený na postrekovú dezinfekciu povrchov, nástrojov a stomatologických koncoviek.

**Použitie:** Direct Spray SL je určený pre postrekovú dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, napríklad na: vyšetrovacie lehátka, operačný kreslá, zdravotnícke nástroje, neinvazívne operačné nástroje, nástroje pre rehabilitáciu a iné ťažko dostupné povrchy zdravotníckych pomôcok. Odporúčame hlavne pre sklenené a lesklé povrchy neinvazívnych zdravotníckych pomôcok. Prostriedok môže byť použitý pre zdravotnícke pomôcky v tesnom kontakte s potravinami. Odporúča sa tiež dezinfekcia stomatologických koncoviek pred sterilizačným procesom, rovnako ako protetických lžít a silikónových odtlačkov. Produkt neobsahuje aldehydy a fenoly.

**Návod na použitie:** Aplikujte prípravok na povrch zo vzdialenosti asi 30 cm a dbajte na jeho úplné pokrytie. Ponechajte ho po celú dobu účinku lieku. Po zaschnutí na povrchu nezanecháva pruhy. Nepoužívajte na povrchy citlivé na alkohol (napr. Akrylové sklo). Výrobok určený pre použitie profesionálnym užívateľom.

**Mikrobiologická účinnosť:** Baktérie (vrátane MRSA) podľa normy: EN 13727 – 30 sec. Huby (*C. albicans*) podľa normy: EN 13624 – 15 sec. Baktérie tuberkulózy (*M. terrae*) podľa normy: EN 14348 – 30 sec.\*, 60 sec. Vírusy (*Vaccinia*, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola) podľa normy: EN 14476 – 30 sec.\*, 60 sec. Vírus Rota v súlade s normou: EN 14476 – 30 sec.\*, 60 sec. Noro vírus podľa štandardu: EN 14476 – 30 sec. (\*Nízke ekologické zaťaženie).

**Zloženie:** 100 g prípravku obsahuje: 63,7 g etanolu, 6,3 g propán-2-olu.

**Bezpečnostné opatrenia:** Veľmi horľavá kvapalina a pary. Dráždi oči. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvorenými plameňmi a inými zdrojmi vznietenia. Nefajčite.

**Pokyny pre ochranu:** V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú k dispozícii, a odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Likvidujte obsah / nádobu v súlade s národnými predpismi. **Obsahuje:** propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Podľa nariadenia 648/2004.