

# Direct Unit NF

---

## Koncentrát pro čištění a dezinfekci odsávacích zařízení.

*Nepěňivý přípravek určený pro současné mytí a dezinfekci odsávacích systémů, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy.*

**Použití:** Direct Unit NF je určen pro současné mytí a dezinfekci odsávacích systémů, separátorů amalgámu a plivátka zubní soupravy. Přípravek je nepěňivý. Při každodenním používání zabraňuje tvorbě biofilmu. Může se také použít k dezinfekci uzavřeného okruhu v horkých vanách, které jsou zdravotnickými zařízeními. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.

**Mikrobiologická účinnost:** Bakterie (včetně MRSA) podle normy EN 13727 (nízké a vysoké ekologické zátěže): 1 % – 15 min, houby (*C. albicans*) podle normy EN 13624 (nízké organické zatížení): 1 % – 15 min, EN 13624 (vysoké organické zatížení): 1 % – 30 min, a 2 % – 15 min, bakterie tuberkulózy (*M. tuberculosis*) podle normy EN 14348 (vysoké organické zatížení): 4 % – 60 min., obalené viry podle následujících norem: EN 14476 (nízké a vysoké organické zatížení): 2 % – 15 min.

**Návod k použití:** Koncentrát je třeba zředit vodou. Aby bylo dosaženo koncentrace 2 %, 20 ml koncentrátu by mělo být rozpuštěno v 980 ml vody.

**Aplikace v sacím systému:** Roztok nasát do sacího systému v závislosti na stupni znečištění jednou nebo dvakrát denně. Nasajte přípravek, vypněte přístroj a nechte ho působit po dobu nejméně 15 minut. Po dezinfekci vypláchněte sací systém vodou. Oplachování může být provedeno po doporučené dezinfekci nebo následujícím dni bezprostředně po spuštění soupravy. Nesměšujte s jinými čistícími nebo dezinfekčními prostředky.

**Aplikace na vířivou vanu:** Před prvním použitím opláchněte zařízení vodou, abyste odstranili zbytky jiných přípravků. Naplňte vanu čistou, studenou vodou nad úroveň trysek. Přidejte 200 ml na každých 10 litrů vody. Zapněte hydromasážní systém po dobu 15 minut. Po použití vyprázdněte vanu a propláchněte vodou. Nekombinujte s jinými přípravky. Nepoužívejte výrobek během léčebné lázně pacienta.

**Složení:** 100 g přípravku obsahuje: 4,4 g dioktylo dimetyloamoniový chlorid (CAS: 5538-94-3), 0,6 g dodecylo dimetylo benzyloamoniový chlorid (CAS: 85409-22-9).

**Bezpečnostní opatření:** Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou / sprchou. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, a odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

Zlikvidujte obsah / nádobu v nádobách s příslušným označením odpadu v souladu s národními předpisy. Obsahuje <5 % neionogenních povrchově aktivních látek. Povrchově aktivní látky splňují požadavky biologického rozkladu v souladu s nařízením. 648/2004.

# Direct Unit NF

---

## Koncentrát na čistenie a dezinfekciu odsávacích zariadení.

*Nepenivý prípravok určený na umývanie a súčasne dezinfekciu odsávacích systémov, separátorov amalgámu a pľuvadla zubnej súpravy.*

**Použitie:** Direct Unit NF je určený pre súčasné umývanie a dezinfekciu odsávacích systémov, separátorov amalgámu a pľuvadla zubnej súpravy. Prípravok je nepenivý. Pri každodennom používaní zabraňuje tvorbe biofilmov. Môže sa tiež použiť na dezinfekciu uzatvoreného okruhu v horúcich vaniach, ktoré sú zdravotníckymi zariadeniami. Výrobok je určený na použitie profesionálnym užívateľom.

**Mikrobiologická účinnosť:** Baktérie (vrátane MRSA) podľa normy EN 13727 (nízke a vysoké ekologické zaťaženie): 1 % – 15 min, huby (*C. albicans*) podľa normy EN 13624 (nízke organické zaťaženie): 1 % – 15 min, EN 13624 (vysoké organické zaťaženie): 1 % – 30 min, a 2 % – 15 min, baktérie tuberkulózy (*M. tuberculosis*) podľa normy EN 14348 (vysoké organické zaťaženie): 4 % – 60 min., obalené vírusy podľa nasledujúcich noriem: EN 14476 (nízke a vysoké organické zaťaženie): 2 % – 15 min.

**Návod na použitie:** Koncentrát je treba zriediť s vodou. Aby sa dosiahla koncentrácia 2%, 20 ml koncentrátu sa má rozpustiť v 980 ml vody.

**Aplikácia v sacom systéme:** Roztok nasať do sacieho systému v závislosti na stupni znečistenia raz alebo dvakrát denne. Nasajte prípravok, vypnite prístroj a nechajte ho pôsobiť po dobu najmenej 15 minút. Po dezinfekcii vypláchnite sací systém vodou. Oplachovanie môže byť vykonané po odporúčanej dezinfekcii alebo nasledujúci deň bezprostredne po spustení súpravy. Nemiešajte s inými čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami.

**Aplikácia na vírivú vaňu:** Pred prvým použitím opláchnite zariadenie vodou, aby ste odstránili zvyšky iných prípravkov. Naplňte vaňu čistou, studenou vodou nad úroveň trysiek. Pridajte 200 ml na každých 10 litrov vody. Zapnite hydromasážny systém po dobu 15 minút. Po použití vyprázdňte vaňu a prepláchnite vodou. Nekombinujte s inými prípravkami. Nepoužívajte výrobok počas liečebného kúpeľa pacienta.

**Zloženie:** 100 g prípravku obsahuje: 4,4 g chlorek dioktyl--dimetyloamoniovy (CAS: 5538-94-3), 0,6 g chlorek dodecyl--dimetyl--benzyloamoniovy (CAS: 85409-22-9).

**Bezpečnostné opatrenia:** Spôsobuje vážne poleptanie kože a vážne poškodenie očí. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí / ochranu tváre. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ STREDISKO / lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odložte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou / sprchou. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Zlikvidujte obsah v nádobe/ nádobu s príslušným označením odpadu v súlade s národnými predpismi. Obsahuje <5 % neionogénnych povrchovo aktívnych látok. Povrchovo aktívne látky spĺňajú požiadavky biodegradácie v súlade s nariadením 648/2004.