

# Direct Wipes NA Refill

---

## Bezalkoholové ubrousky pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.

*Bezalkoholické ubrousky pro čištění a dezinfekci, speciálně určené pro povrchy neinvazivních zdravotnických prostředků citlivých na alkohol. Účinkují do minuty.*

**Použití:** Direct Wipes NA se doporučuje zejména pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků z plastu, akrylátového skla, nerezové oceli, kovu, hliníku, pryže a porcelánu. Mohou být použity v jednotce intenzivní péče a operačním sále, pro dezinfekci zdravotnického zařízení, rehabilitačních zařízení, křesel, inkubátorů, hlavic USG a lamp určených pro léčbu. Neobsahují aldehydy a fosfáty, díky nimž nepřebarvují dezinfikované povrchy. Mají příjemnou vůni.

**Návod k použití:** Vyjměte ubrousek z obalu a utřete s ním dezinfikovaný povrch. Opatrně zavřete víko dózy. Po otevření spotřebujte do 30 dnů. Nepoužívejte, pokud je ubrousek suchý. Povrch nevyžaduje oplachování vodou. V případě obzvláště citlivých povrchů se doporučuje testovat na neviditelném místě. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.

**Mikrobiologická účinnost:** Bakterie (včetně MRSA) podle EN 13727: 1 min. Houby (*C. albicans*) podle EN 13624: 1 min. Bakterie tuberkulózy (*M. terrae*) podle EN 14348: 5 min\*, 10 min. Viry (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, chřipkový virus, Herpes simplex, Ebola) podle EN 14476: 1 min. (\* znamená nízké ekologické zatížení).

**Složení:** 100 kusů obsahuje: 173 g roztoku. 100 g roztoku obsahuje: 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N--dodecylpropano-1,3--diamina (CAS: 2372-82-9), 0,14 g Poli (oksy-1,2-etanodilo). alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-. omega.-hydroxy-,propanian (sůl) (CAS:94667-33-1).

**Bezpečnostní opatření:** Dráždí kůži. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Opláchněte velkým množstvím vody. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Podle nařízení. 648/2004: <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. Složení vonné látky (LIMONE). Povrchově aktivní látky splňují požadavky biologického rozkladu v souladu s nařízením. 648/2004.

# Direct Wipes NA Refill

---

## Bezalkoholové utierky pre dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok.

*Bezalkoholické utierky na čistenie a dezinfekciu, špeciálne určené pre povrchy neinvazívnych zdravotníckych pomôcok citlivých na alkohol. Účinkujú do minúty.*

**Použitie:** Direct Wipes NA sa odporúča najmä pre dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok z plastu, akrylového skla, nerezovej ocele, kovu, hliníka, gumy a porcelánu. Môžu byť použité v jednotke intenzívnej starostlivosti a operačnom sále, na dezinfekciu zdravotníckeho zariadenia, rehabilitačných zariadení, kresiel, inkubátorov, hlavíc USG a lúčových urýchľovačov určených pre liečbu. Neobsahujú aldehydy a fosfáty, vďaka ktorým neprefarbuje dezinfikované povrchy. Majú príjemnú vôňu.

**Návod na použitie:** Vyberte utierku z obalu a utrite s ňou dezinfikovaný povrch. Opatrne uzavrite vrchnák dózy. Po otvorení spotrebujte do 30 dní. Nepoužívajte, ak je obrúsok suchý. Povrch nevyžaduje oplachovanie vodou. V prípade obzvlášť citlivých povrchov sa odporúča testovať na neviditeľnom mieste. Výrobok je určený na použitie profesionálnym užívateľom.

**Mikrobiologická účinnosť:** Baktérie (vrátane MRSA) podľa EN 13727: 1 min. Huby (*C. albicans*) podľa EN 13624: 1 min. Baktérie tuberkulózy (*M. terrae*) podľa EN 14348: 5 min\*, 10 min. Vírusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, chrípkový vírus, Herpes simplex, Ebola) podľa EN 14476: 1 min. (\* znamená nízke ekologické zaťaženie).

**Zloženie:** 100 kusov obsahuje: 173 g roztoku. 100 g roztoku obsahuje: 0,15 g N- (3-aminopropyl) - N--dodecylpropano-1,3-diamín (CAS: 2372-82-9), 0,14 g Poli (oksy-1,2-etanodilo). alfa.- [2-(didecylmetylamino) etyl] -. omega.-hydroxy-, propanian (soľ) (CAS: 94667-33-1).

**Bezpečnostné opatrenia:** Dráždi kožu. Dráždi oči. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranu očí / ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opláchnite veľkým množstvom vody. V PRÍPADE ZASIAHNUTIA OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú prítomné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Podľa nariadenia 648/2004: <5 % kationové povrchovo aktívne látky, <5 % aniónové povrchovo aktívne látky. Zloženie vonné látky (LIMONE). Povrchovo aktívne látky spĺňajú požiadavky biologického rozkladu v súlade s nariadením 648/2004.